



REHAU Face Shield PET-G


Sicura e semplice da indossare

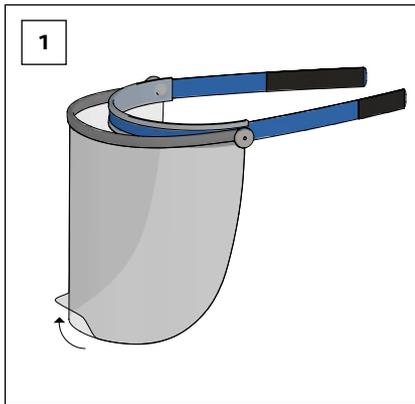

Rimuovere la pellicola protettiva come rappresentato.

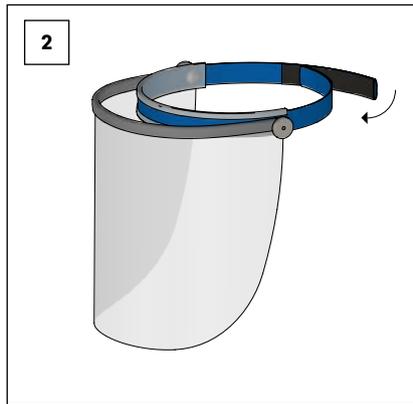

Indossare Face Shield al capo e fissarla saldamente con la fascia in velcro.

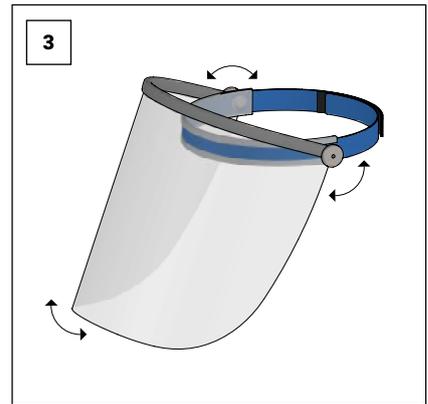

Allentare leggermente le viti di fissaggio, regolare l'angolo della visiera e serrare nuovamente le viti.



Indicazione di sicurezza 1

REHAU Face Shield PET-G protegge dai liquidi sotto forma di gocce e spruzzi, riducendo così il rischio di contrarre infezioni tramite l'inalazione di goccioline. Per via della configurazione del prodotto, la protezione da virus, batteri e altri agenti biologici è limitata. Utilizzabile in abbinamento con mascherine per il viso e occhiali protettivi. La visiera rientra nella classe ottica 1.

- REHAU Face Shield PET-G soddisfa i principali requisiti sanitari e di sicurezza riportati nel regolamento in materia di DPI (PSA) 2016/425 nonché nella norma EN 166:2001 (REHAU Face Shield PET-G non protegge da sollecitazioni meccaniche).
- La protezione per il viso deve essere smaltita dopo l'uso. La decisione di riutilizzare o meno il prodotto spetta all'utente.
- La protezione per il viso è utilizzabile in abbinamento a mascherine per il viso, occhiali protettivi e caschi.

Indicazioni per la pulizia



Per la pulizia utilizzare acqua saponata pulita!

Disinfettare con i comuni disinfettanti.



- Applicare l'acqua saponata con un panno umido
- Risciacquare con acqua pulita
- Asciugare con un panno morbido

Marchio: REH CE

REH = sigla produttore

CE = marchio di conformità UE

REHAU Face Shield PET-G

- Se non vengono indossati, gli occhiali protettivi devono essere conservati in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Per evitare graffi, riporre gli occhiali facendo attenzione a non rivolgere la superficie visiva verso il basso.
- Le protezioni per il viso devono essere sostituite se presentano una superficie macchiata, pesantemente graffiata o con particelle permanenti. Questo principio vale anche nel caso in cui le suddette protezioni presentino danni di altro tipo oppure non sia più possibile serrare saldamente le viti di fissaggio, rendendo di fatto impossibile il posizionamento stabile e sicuro della visiera.

Accessori:

non presenti

Durata del prodotto, se conservato in un luogo asciutto e al riparo dalla luce:

1 anno

Normative di armonizzazione:

Regolamento 2016/425/UE

Direttiva 2001/95/CE

EN 166:2001

Valutazione del rischio:

→ si veda l'Indicazione di Sicurezza 1

- non fornisce protezione da radiazioni (ad es. raggi solari, raggi UV, radiazioni nella saldatura, raggi infrarossi)
- non ignifugo
- una protezione per il viso danneggiata può avere conseguenze sulla vista e sulla protezione
- l'eventuale contatto di materiale con la pelle può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

L'organismo notificato DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, D-12103 Berlino, notified body Nr. 0196 ha effettuato la verifica del campione (modulo B) e rilasciato la certificazione C6477REH/RO per il campione in questione.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo

www.rehau.it/faceshield

© REHAU S.p.A.

Via XXV Aprile 54

20040 Cambiago (MI)

www.rehau.it